

DERMATOSCOPIO DERMAUX GX5

Manual de usuario

DERMAUX



Las siguientes instrucciones le permitirán familiarizarse con el dispositivo.
¡Por favor revíselos cuidadosamente!


Uso previsto

Dermatoscopio de grado médico alimentado internamente para uso diagnóstico de lesiones cutáneas y/o cuero cabelludo.

Se puede utilizar tanto para el examen de la piel con contacto como sin contacto gracias a su sistema de iluminación especial.

Descripción del producto

- ① Montaje de lente universal
- ② ON/OFF/luz polarizada
- ③ ON/OFF Luz no polarizada
- ④ Indicador de batería
- ⑤ Conector de carga
- ⑥ placa de contacto

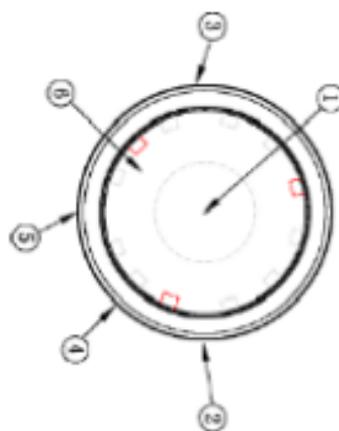

KIT INCLUYE

El conjunto consta del dermatoscopio con montura de lente universal, montura de doble lente de metal, cable USB-C, estuche de transporte de grado médico, paño limpio y manual de usuario.

Datos técnicos

Material	Aluminio y Vidrio
Diseño Óptico	Cristal, 4 elementos 3 grupos, revestimiento antirreflectante
Diámetro de la lente	46 mm
Aumento	10X NATIVO
Distorsión	Menor al 1%
Tiempo de trabajo	90 minutos
Polarización	3 LED no polarizados, 9 LED polarizados
Resolución	300 LP/MM (Eje) 300 LP/MM (Borde)
Tipo de LED	LED SMD
Capacidad de la batería	Ion Litio 200 mAh



cargue el instrumento completamente antes del primer uso

Operación

Este dermatoscopio se debe operar junto con un teléfono inteligente o una tableta. Conecte la montura de la lente con el teléfono inteligente y atornille el dermatoscopio en la cámara principal del teléfono.

•Encendido apagado

Presione on/off para encender, mantenga presionado 3 segundos para apagar. El instrumento automáticamente

se apaga si no hay operación en 3 minutos.

- **Modo polarizado**

El modo predeterminado es iluminación de luz polarizada cuando se enciende.

- **Modo no polarizado**

Presione el botón no polarizado para cambiar al modo no polarizado.

Garantía

El dispositivo no requiere mantenimiento. El ciclo de vida esperado asciende con el uso designado y la observación de las advertencias e información de seguridad, así como las instrucciones de operación hasta 2 años.

Instrucciones de eliminación



El dispositivo no puede desecharse como basura doméstica. Deseche el dispositivo en una instalación de desechos que acepte aparatos electrónicos/eléctricos.



FGMS

