

DERMATOSCOPIO DERMAUX DX3

manual usuario

DERMAUX




**Las siguientes instrucciones de uso le
permitirán familiarizarse con el dispositivo.
¡Léalas atentamente!**

Uso previsto

Este dispositivo es un microscopio médico con alimentación propia para el diagnóstico de lesiones cutáneas. Gracias a su sistema de iluminación especial, permite la exploración de la piel tanto por contacto como sin contacto. La montura universal de la lente facilita la conexión del dermatoscopio a un teléfono inteligente o tableta para capturar y visualizar imágenes.

Descripción general del producto

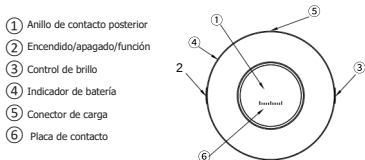

KIT INCLUYE

El conjunto consta de dermatoscopio con montura de lente universal, montura de lente doble de metal, cable USB-C, estuche de transporte, paño de limpieza y manual de usuario.

Datos técnicos

Diseño óptico	Aluminio y vidrio.
Material	Cristal , 4 elementos, 3 grupos, anti-recubrimiento reflectante
Diámetro de la lente	25 mm (delantera); 15 mm (trasera);
Aumento	10X
Distorsión	5%
Tiempo funcionamiento	60 minutos
Polarización	16 LED, 8 polarizados, 4 no polarizados; 4 Luz ultravioleta de 365 nm
Resolución	300 LP/MM (Eje) 280 LP/MM (Borde)
Tipo de LED	LED SMD beads
Batería	Batería de iones de litio de 230 mAh



Cargue completamente el instrumento antes del primer uso.

Operación

Para encender la iluminación

Pulse el botón (②, ③) del instrumento. El dispositivo se inicia en modo polarizado blanco.

● Encendido/Apagado

Pulse el botón de encendido/apagado durante un segundo para encender el dermatoscopio. Manténgalo pulsado durante 3 segundos para apagarlo.

● **Modo de funcionamiento:**

Al encenderlo, el modo predeterminado es iluminación con luz polarizada. Pulse de nuevo para cambiar al modo sin polarizar y pulse una vez más para activar el modo de lámpara de Wood (UV). Circulación.

● **Control de brillo**

Pulse el control de brillo ③ para cambiar el brillo. Hay 3 niveles de brillo en cada modo.

Garantía

El dispositivo no requiere mantenimiento. Su vida útil prevista, con un uso adecuado y siguiendo las advertencias, la información de seguridad y las instrucciones de mantenimiento, es de hasta 2 años.

Advertencia

► ¡Compruebe el correcto funcionamiento del dispositivo antes de usarlo! No utilice el dispositivo si hay signos visibles de daños o si la luz comienza a parpadear.

► No utilice el dispositivo en áreas con riesgo de incendio o explosión (por ejemplo, ambientes saturados de oxígeno o anestésicos).

► No está permitido introducir ni utilizar este producto en campos magnéticos fuertes, como los de los escáneres de resonancia magnética.

► No modifique el dispositivo.

► Utilice únicamente accesorios y fuentes de alimentación originales.

► No mire directamente a la fuente de luz para evitar el deslumbramiento por la luz intensa.

► Los dermatoscopios no son adecuados para el examen ocular.

Instrucción de eliminación



Este dispositivo no debe desecharse con la basura doméstica. Llévelo a un punto limpio que acepte aparatos electrónicos.

